

Common Problem 常见问题

Q 顾客A: 是否能与我的某品牌胰岛素笔配套使用?

A 贝普: 贝普针头是根据国际胰岛素针头的标准研发、生产, 适用匹配目前市面上标准的所有主流品牌胰岛素笔。

Q 顾客B: 是否能与我的某胰岛素液配套使用?

A 贝普: 贝普胰岛素针头是穿刺皮肤注射的工具, 不影响胰岛素液的注入。

Q 顾客C: 用这款针头会有疼痛感吗?

A 贝普: 贝普针头极细, 所以近乎无痛, 但针头如果被多次使用, 会出现钝化情况, 会增加疼痛感。每次入针位置需距离12厘米, 相同位置的入针点要间隔一个月后注射。

Q 顾客d: 注射完毕, 拔出针头后发现针尖有滴液, 是什么问题?

A 贝普: 药物注射完成后, 应在拔出针头前, 将针头停留至少10秒, 以确保药物剂量全部被注入体内, 同时防止药液渗漏。针尖有滴液情况, 可能是针头在体内停留时间短, 建议加长体内停留时间。



MEDICAL TRIFOLD 贝普医疗

执着健康 / 善泽天下

中国·贝普医疗科技股份有限公司

✉ info@berpu.com

☎ 400-823-2788

🌐 www.berpu.com

📍 浙江省温州市龙湾区永兴街道兴吉路14号

② 每支限一次性使用



MEDICAL TRIFOLD 贝普医疗

一 / 次 / 性 / 使 / 用 / 胰 / 岛 / 素 / 针

CHINA·BERPU

MEDICAL TECHNOLOGY CO.LTD.

BERPU 贝普®

执着健康 善泽天下

Product Description 产品描述

- 高精度的针管最大程度减少注射疼痛。
- 注射端采用三斜面针尖设计，易于穿刺，损伤小。
- 双重保护帽，安全保障。
- 环氧乙烷灭菌，无菌，无热原。
- 通配于中国市场上现有的糖尿病药物注射笔。

贝普医疗是国内最早(先)生产胰岛素针头的企业;现今,贝普医疗已成功推出了超细(34G)最短(4mm)的系列产品,全方位为减轻患者疼痛而努力。




食品级内袋，更安全！




Product Information 产品信息

- 产品名: 贝普一次性使用胰岛素针
- 通用名: 一次性使用胰岛素针
- 生产许可证号: 浙食药监械生产许20110026号
- 产品注册证号: 国械注准20173154161
- 注册人/生产企业名称: 贝普医疗科技有限公司

Product Advantages 产品优点

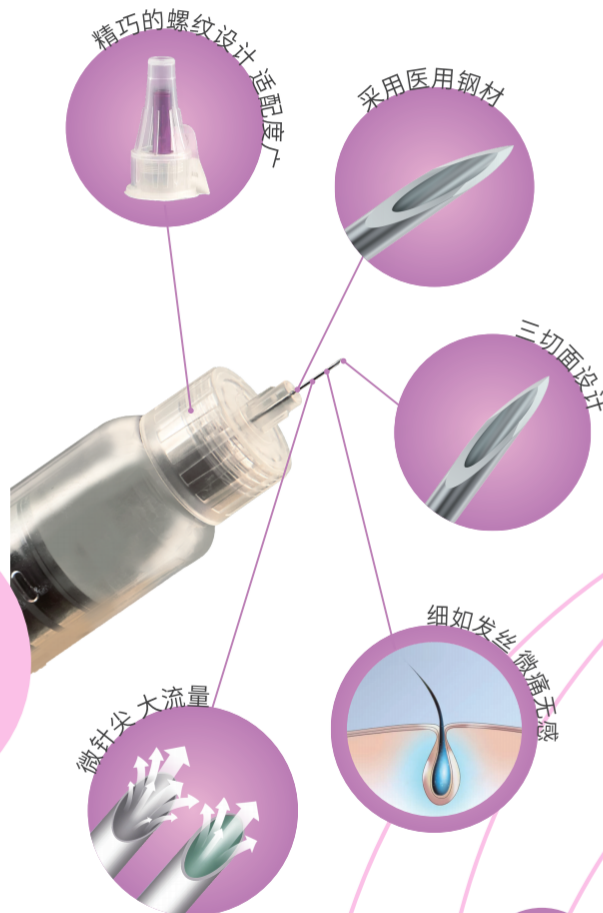

Caution For Reuse 进针示意图

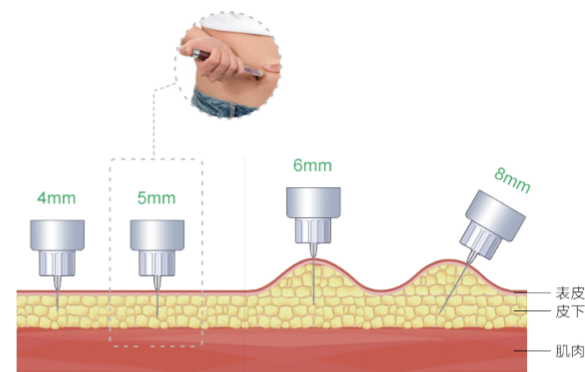

Matching Degree Is High 兼容匹配度高

